

検体（唾液）採取・提出の注意事項

配付する物

パウチ袋 1枚

キャップ 1個

不活液 1個

唾液採取管（青いろう斗、
ID シール付き） 1個


検査同意書 1枚



提出する物

唾液採取管（赤いキャップ、ID シール貼付、パウチ袋に収納）
1セット

検査同意書（記入済み）
1枚
※袋に入れない

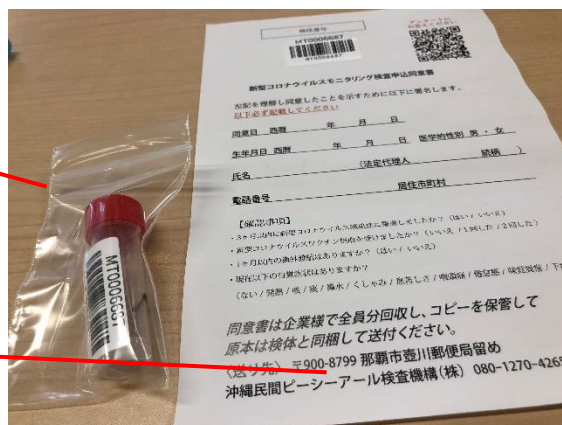

1. 採取管と検査同意書の ID シールの番号で被検者名簿を管理するので、必ず配付された検査キットを使用してください。

2. 同意書の裏面をよく読み、表面の必要事項をすべて記入してください。

【重要】18歳未満の学生は、必ず事前に保護者に連絡し、同意を得たうえで「法定代理人」欄に保護者の氏名と続柄を記入してください。

3. 唾液の採取は、提出する当日に行なってください。

4. 採取・提出方法は裏面をご覧ください。

5. 下の QR コードから、Forms アンケートに必ず回答してください。

質問 4・質問 5 は、以下のとおり回答してください。

○質問 4. 勤務先の業種は？

「教育・学習支援業」

○質問 5. あなたの職種は？

学 生＝「学生」

事務職員＝「事務」

上記以外＝「専門・技術」









自分で簡単に検体採取し不活化できる

検体採取方法の
動画もあります



①この線まで唾液を入れる

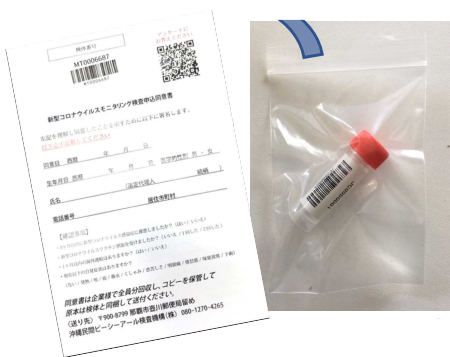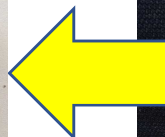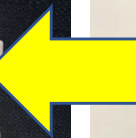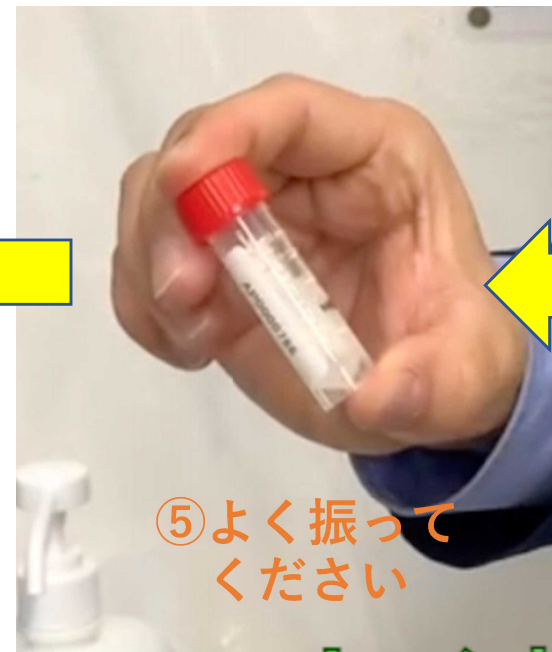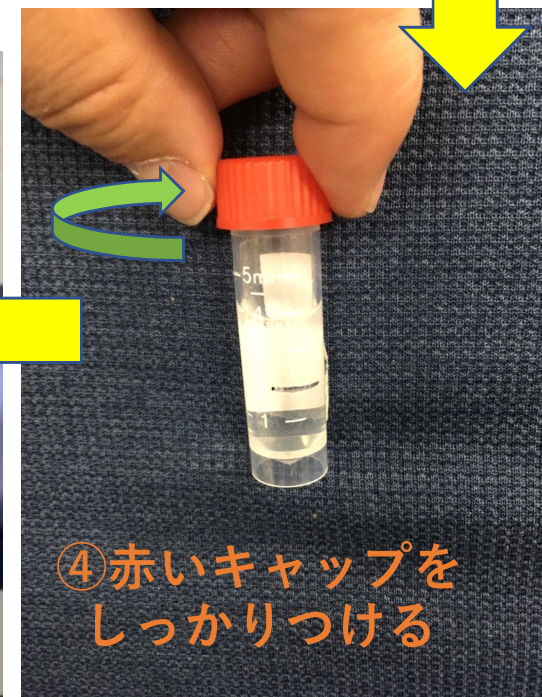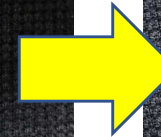

⑦パウチ袋に入れて、
同意書と一緒に提出